

Informations sur les jeux de paramètres :

Type : Personnalisé  
Nom : CASFM EUCAST 2024 V1.0  
Description : EUCAST Guideline+backfilled and Phenotypic Interpretations  
Base : Global European-based+Phenotypic  
État : Actif

Informations sur les instructions CMI :

Type : Personnalisé  
Nom : Copie de Global European-based  
Base : Global European-based

Informations de filtrage :

Tous  
Version d'antibiotique : Masquer tout

Concentration(s) critique(s) :

Germe/Antibiotique/Version d'antibiotique	Catégorie	S	SDD	I	R	Origine	Commentaire
Acinetobacter							
Amikacine							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8			> 8	EUCAST	
Ceftazidime							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (caz02n)	Autre	<= 8		16	> 16	CLSI-O	
Aucun type de carte AST défini (caz01n)	Autre	<= 8		16	> 16	BTC	
Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre						
Aucun type de carte AST défini (caz03n)	Autre						
Aucun type de carte AST défini (caz03s)	Autre						
Ciprofloxacine							

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre				<= 1	> 1	EUCAST	
Colistine								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2				> 2	EUCAST	
Céfépime								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8			16	> 16	CLSI-O	
Gentamicine								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4				> 4	EUCAST	
Imipénème								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N441, AST-N442 (ipm04n)	Autre	<= 2			4	> 4	EUCAST	
AST-N443 (ipm05n)	Autre	<= 2			4	> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre	<= 2			4	> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre	<= 2			4	> 4	EUCAST	
Lévofloxacine								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (lev02n)	Autre	<= 0,5			1	> 1	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre							
Méropénème								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N443, AST-XN28 (mem02n)	Autre	<= 2			4 - 8	> 8	EUCAST	
AST-N443, AST-XN28 (mem02n)	Méningite	<= 2				> 2	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2			4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite							
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2			4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite							
Pipéracilline								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16			32 - 64	> 64	CA-	
Pipéracilline/tazobactam								

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Page 4 sur 37



Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Antifongigramme										
AST-YS08 (cas02n)	Autre		<= 0,125		0,25	> 0,25	CLSI-O			
Fluconazole										
Antifongigramme										
AST-YS08 (flu02n)	Autre		<= 32			> 32	CLSI-O			
Micafungine										
Antifongigramme										
AST-YS08 (mcf02n)	Autre		<= 0,0625		0,125	> 0,125	CLSI			
Posaconazole										
Antifongigramme	Autre						CLSI			
Candida guilliermondii										
Amphotéricine B										
Antifongigramme										
Aucun type de carte AST défini (ab02n)	Autre						CLSI			
Anidulafungine										
Antifongigramme	Autre		<= 2		4	> 4	CLSI			
Caspofungine										
Antifongigramme										
AST-YS08 (cas02n)	Autre		<= 2		4	> 4	CLSI-O			
Micafungine										
Antifongigramme										
AST-YS08 (mcf02n)	Autre		<= 2		4	> 4	CLSI			
Posaconazole										
Antifongigramme	Autre						CLSI			
Candida kefyr										
Amphotéricine B										
Antifongigramme										
Aucun type de carte AST défini (ab02n)	Autre						CLSI			

## Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Page 8 sur 37



Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Antifongogramme	Autre								CLSI	
Candida parapsilosis										
Amphotéricine B										
Antifongogramme										
Aucun type de carte AST défini (ab02n)	Autre								CLSI	
Anidulafungine										
Antifongogramme	Autre						4	> 4	CLSI	
Caspofungine										
Antifongogramme										
AST-YS08 (cas02n)	Autre						4	> 4	CLSI-O	
Fluconazole										
Antifongogramme										
AST-YS08 (flu02n)	Autre					4		> 4	CLSI-O	
Micafungine										
Antifongogramme										
AST-YS08 (mcf02n)	Autre						4	> 4	CLSI	
Posaconazole										
Antifongogramme	Autre								CLSI	
Voriconazole										
Antifongogramme										
Aucun type de carte AST défini (vrc02n)	Autre						0,25 - 0,5	> 0,5	CLSI	
Candida tropicalis										
Amphotéricine B										
Antifongogramme										
Aucun type de carte AST défini (ab02n)	Autre								CLSI	
Anidulafungine										
Antifongogramme	Autre						0,5	> 0,5	CLSI	
Caspofungine										

Page 10 sur 37

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

---

Page 11 sur 37

Page 12 sur 37

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

AST-N441 (ctx02n)	Méningite	<= 1		> 1	CA-	CSN 2024-814-0	
Aucun type de carte AST défini (ctx01n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (ctx01n)	Méningite	<= 1		> 1	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction	
Aucun type de carte AST défini (ctx02s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (ctx02s)	Méningite						
Céfovecine							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire	
Céfoxitine							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	Fabricant	Cc modifiées Extension CSN 2024-814-0	
Céfépime							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST		
Doxycycline							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4	8	> 8	CLSI	CASFM Vétérinaire	
Ertapénème							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST		
Florfenicol							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire	
Fluméquine							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	CASFM Vétérinaire	
Fosfomycine							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N436, AST-N442 (fos02n)	Autre	<= 32		> 32	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (fos03n)	Autre	<= 32		> 32	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (fos03n)	Urine	<= 8		> 8	Fabricant	Validation en attente	
Gentamicine							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N441 (gm02n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (gm01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-009-0	

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Aucun type de carte AST défini (gm02s)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Imipenem/Relebactam						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Imipénème						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N441, AST-N442 (ipm04n)	Autre	<= 2	4	> 4	EUCAST	
AST-N443 (ipm05n)	Autre	<= 2	4	> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre	<= 2	4	> 4	Fabricant	Cc modifiées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre	<= 2	4	> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre	<= 2	4	> 4	EUCAST	
Lévofoxacine						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (lev02n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	Fabricant	Cc modifiées pour déduction
Meropenem/Vaborbactam						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Moxifloxacine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Méropénème						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N443, AST-XN28 (mem02n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
AST-N443, AST-XN28 (mem02n)	Méningite	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite	<= 2		> 2	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite	<= 2		> 2	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Nitrofurantoïne						
Antibiogramme Gram négatif						

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

AST-N436, AST-N442 (ft01n)	Autre	<= 32	64	> 64	CLSI	Cc basse non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (ft04n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (ft04n)	Urine	<= 64		> 64	CA-	
Néomycine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	CA-	CASFM Vétérinaire
Ofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Pipéracilline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Pipéracilline/tazobactam						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N441, AST-N442, AST-N443 (tzip03n)	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2022-158-2
Aucun type de carte AST défini (tzip01n)	Autre	<= 8		> 8	Fabricant	Cc modifiées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (tzip03s)	Autre	<= 8		> 8	Fabricant	Cc modifiées pour déduction
Pradofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Ticarclilline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Ticarclilline/acide clavulanique						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST	
Tobramycine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Triméthoprime						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	CA-	CSN 5024-2
Triméthoprime/sulfaméthoxazole						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST	
Témocilline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM

## Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Page 16 sur 37



Rapport AES sur les concentrations critiques

Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre								
Érythromycine									
Antibiogramme Gram positif	Autre								
Enterococcus faecalis									
Daptomycine									
Antibiogramme Gram positif	Autre								
Tigecycline									
Antibiogramme Gram positif	Autre								
Enterococcus faecium									
Quinupristine/dalfopristine									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667, AST-P668 (qda01n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (qda02n)	Autre								
Tigecycline									
Antibiogramme Gram positif	Autre								
Escherichia coli									
Céfoxitine									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Céfuroxime									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Céfuroxime axétil									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Delafloxacin									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Eravacycline									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								



Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Rapport AES sur les concentrations critiques

Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8		16	> 16	CA-	CASFM Vétérinaire
Pradofloxacin								
Antibiogramme Gram négatif	Autre		(-)	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Pasteurella multocida								
Ciprofloxacine								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Autre		<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre		<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST	
Doxycycline								
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 1			> 1	EUCAST	
Proteus								
Imipénème								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N441, AST-N442 (ipm04n)	Autre				<= 4	> 4	EUCAST	
AST-N443 (ipm05n)	Autre				<= 4	> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre				<= 4	> 4	EUCAST	
Proteus mirabilis								
Céfuroxime								
Antibiogramme Gram négatif	Autre				<= 8	> 8	EUCAST	
Céfuroxime axétil								
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8			> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Témocilline								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-XN28 (tem01n)	Autre				<= 16	> 16	Fabricant	
AST-XN28 (tem01n)	Urine		<= 8			> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Providencia								
Imipénème								
Antibiogramme Gram négatif								

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre			<= 1	> 1	Fabricant	Cc modifiées pour déduction
Méropénème							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		4 - 8	> 8	EUCAST	
Pipéracilline							
Antibiogramme Gram négatif							
Aucun type de carte AST défini (pip01n)	Autre			<= 16	> 16	Fabricant	Cc modifiées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (pip02n)	Autre			<= 16	> 16	EUCAST	
Pipéracilline/tazobactam							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N441, AST-N442, AST-N443 (tzip03n)	Autre			<= 16	> 16	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (tzip01n)	Autre			<= 16	> 16	Fabricant	Cc modifiées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (tzip03s)	Autre			<= 16	> 16	EUCAST	
Ticarclilline							
Antibiogramme Gram négatif	Autre			<= 16	> 16	EUCAST	
Ticarclilline/acide clavulanique							
Antibiogramme Gram négatif	Autre			<= 16	> 16	EUCAST	
Tobramycine							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2			> 2	EUCAST	
Pseudomonas aeruginosa							
Ceftazidime/Avibactam							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N443, AST-XN28 (cza02n)	Autre	<= 8			> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cza01n)	Autre	<= 8			> 8	FDA	
Aucun type de carte AST défini (cza02s)	Autre	<= 8			> 8	EUCAST	
Colistine							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N443, AST-XN28 (cs02n)	Autre	<= 2			> 2	EUCAST	
Imipenem/Relebactam							

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Meropenem/Vaborbactam						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Méropénème						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N443, AST-XN28 (mem02n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-	
AST-N443, AST-XN28 (mem02n)	Méningite	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite	<= 2		> 2	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-	
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite	<= 2		> 2	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Raoultella ornithinolytica						
Céfuroxime						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Céfuroxime axétil						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Raoultella planticola						
Céfuroxime						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Céfuroxime axétil						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Raoultella terrigena						
Céfuroxime						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Céfuroxime axétil						
Antibiogramme Gram négatif	Autre					
Salmonella						
Ciprofloxacine						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Antibiogramme Gram négatif									
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Autre		<= 0,0625				> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre		<= 0,0625				> 0,0625	EUCAST	
Staphylococcus									
Acide fusidique									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 1				> 1	EUCAST	
Ciprofloxacine									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667 (cip01n)	Autre				<= 1		> 1	EUCAST	
Clindamycine									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 0,25				> 0,25	CA-	CSN 2023-386-0
Céfovecine									
Antibiogramme Gram positif	Autre		(-)	(-)	(-)		(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Daptomycine									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 1				> 1	EUCAST	
Doxycycline									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 1				> 1	CA-	CSN 2023-544-0
Enrofloxacin									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 0,5			1 - 2	> 2	CA-	CASFM Vétérinaire - Cc basse non conforme
Florfenicol									
Antibiogramme Gram positif	Autre		(-)	(-)	(-)		(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Fosfomycine									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 32				> 32	EUCAST	
Gentamicine									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 2				> 2	CA-	CSN 2023-386-0
Kanamycine									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 8				> 8	CA-	
Linézolide									





Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

---

Page 26 sur 37

Page 27 sur 37

Page 28 sur 37

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

---

Page 29 sur 37

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Page 32 sur 37



## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Aucun type de carte AST défini (amx03n)	Méningite	<= 0,5			> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (amx03n)	Oral	<= 0,5	1		> 1	CA-	CSN 4911
Ampicilline							
Antibiogramme des streptocoques							
AST-ST03 (am01n)	Autre	<= 0,5	1		> 1	CA-	CSN 2022-158-0
AST-ST03 (am01n)	Méningite	<= 0,5			> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Benzylpénicilline							
Antibiogramme des streptocoques							
AST-ST03 (p01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST	
AST-ST03 (p01n)	Méningite	<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Méningite	<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif							
AST-P667 (p02n)	Autre						
AST-P667 (p02n)	Méningite						
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Méningite	<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre						
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Méningite						
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre						
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Méningite						
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre						
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Méningite						
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Méningite	<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST	
Ceftriaxone							
Antibiogramme des streptocoques							
AST-ST03 (cro01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2		> 2	EUCAST	

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

AST-ST03 (cro01n)	Méningite	<= 0,5			> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (cro01s)	Autre	<= 0,5		1 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cro01s)	Méningite	<= 0,5			> 0,5	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Antibiogramme Gram positif							
Aucun type de carte AST défini (cro01n)	Autre	<= 0,5		1 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cro01n)	Méningite	<= 0,5			> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Chloramphénicol							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 8			> 8	EUCAST	ECOFF
Antibiogramme Gram positif							
Aucun type de carte AST défini (c01n)	Autre	<= 8			> 8	EUCAST	ECOFF
Clindamycine							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5			> 0,5	EUCAST	
Céfotaxime							
Antibiogramme des streptocoques							
AST-ST03 (ctx01n)	Autre	<= 0,5		1 - 2	> 2	EUCAST	
AST-ST03 (ctx01n)	Méningite	<= 0,5			> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Antibiogramme Gram positif							
Aucun type de carte AST défini (ctx01n)	Autre	<= 0,5		1 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ctx01n)	Méningite	<= 0,5			> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (ctx04n)	Autre	<= 0,5		1 - 2	> 2	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (ctx04n)	Méningite	<= 0,5			> 0,5	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Céfuroxime							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		1	> 1	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif							
AST-P667 (cxm01d)	Autre	<= 0,5		1	> 1	EUCAST	
Céfépime							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1		2	> 2	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1		2	> 2	EUCAST	



## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:53 CEST

Aucun type de carte AST défini (sxt01n)	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST	
Tétracycline						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1		> 1	CA-	CSN 2023-544-0
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (te01n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Érythromycine						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25		> 0,25	CA-	CSN 2023-544-0
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (e04n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Amoxicilline						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
Ampicilline						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
Benzylpénicilline						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5 - 2	> 2	EUCAST	
Ceftriaxone						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Clindamycine						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Céfotaxime						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Ertapénème						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Imipénème						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Moxifloxacine						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	ECOFF

## BIOMERIEUX

Imprimé le 23 av. 2025 21:53 CEST

Méropénème									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2			> 2	EUCAST			
Tétracycline									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1			> 1	CA-		CSN 2024-814-0	
Érythromycine									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25		0,5	> 0,5	CA-		Cc haute non conforme au CASFM	