

Informations sur les jeux de paramètres :

Type : Personnalisé
Nom : CASFM EUCAST 2024 V1.0
Description : EUCAST Guideline+backfilled and Phenotypic Interpretations
Base : Global European-based+Phenotypic
État : Actif

Informations sur les instructions CMI :

Type : Personnalisé
Nom : Copie de Global European-based
Base : Global European-based

Informations de filtrage :

Tous
Version d'antibiotique : Masquer tout

Concentration(s) critique(s) :

Germe/Antibiotique/Version d'antibiotique	Catégorie	S	SDD	I	R	Origine	Commentaire
Acide fusidique							
Staphylococcus							
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1			> 1	EUCAST	
Acide nalidixique							
Enterobacterales							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16			> 16	CA-	
Amikacine							
Acinetobacter							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8			> 8	EUCAST	
Enterobacterales							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8			> 8	EUCAST	

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Page 2 sur 38

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Page 3 sur 38

Page 4 sur 38

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Antifongogramme	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI	
Candida kefyr						
Antifongogramme	Autre				CLSI	
Candida krusei						
Antifongogramme	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI	
Candida lusitanae						
Antifongogramme	Autre				CLSI	
Candida parapsilosis						
Antifongogramme	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI	
Candida tropicalis						
Antifongogramme	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI	
Aztréonam						
Aeromonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	> 16	EUCAST	
Benzy/pénicilline						
Staphylococcus aureus						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Staphylococcus lugdunensis						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (p02n)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
AST-P667 (p02n)	Méningite	<= 0,125		> 0,125	CA-	CSN 2022-158-2
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Méningite					
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (p01n)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
AST-ST03 (p01n)	Méningite	<= 0,125		> 0,125	CA-	CSN 2024-814-0
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Méningite					
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (p01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	
AST-ST03 (p01n)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif						

Rapport AES sur les concentrations critiques

AST-P667 (p02n)	Autre								
AST-P667 (p02n)	Méningite								
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2				EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625				EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Méningite								
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Méningite								
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Méningite								
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2				EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625				EUCAST	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5 - 2	> 2				EUCAST	
Caspofungine									
Candida									
Antifongigramme									
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 2						FDA	
Aucun type de carte AST défini (cas01n)	Autre	<= 2						BTC	
Candida albicans									
Antifongigramme									
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5				CLSI-O	
Candida glabrata									
Antifongigramme									
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,125	0,25	> 0,25				CLSI-O	
Candida guilliermondii									
Antifongigramme									
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 2	4	> 4				CLSI-O	

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Aucun type de carte AST défini (bpr01n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Ceftiozane/Tazobactam						
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Ceftriaxone						
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (cro01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
AST-ST03 (cro01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (cro01s)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cro01s)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (cro01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cro01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Chloramphénicol						
Burkholderia cepacia						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI-O	
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16		> 16	Fabricant	ECOFF
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	ECOFF
Antibiogramme Gram positif						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Aucun type de carte AST défini (c01n)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	ECOFF
Ciprofloxacine						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 1	> 1	EUCAST	
Aeromonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Méningite	<= 0,125		> 0,125	CA-	CSN 2023-544-0
Aucun type de carte AST défini (cip01n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip01n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Méningite					
Pasteurella multocida						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Salmonella						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (cip01n)	Autre		<= 1	> 1	EUCAST	
Clindamycine						

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1		> 1	EUCAST	
Céfotaxime						
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N441 (ctx02n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
AST-N441 (ctx02n)	Méningite	<= 1		> 1	CA-	CSN 2024-814-0
Aucun type de carte AST défini (ctx01n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ctx01n)	Méningite	<= 1		> 1	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (ctx02s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ctx02s)	Méningite					
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (ctx01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
AST-ST03 (ctx01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (ctx01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ctx01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (ctx04n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (ctx04n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Céfovecine						
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Céfoxitine						
Enterobacterales						

Page 14 sur 38

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

AST-P667 (cxm01d)	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST	
Céfuroxime axétil						
Escherichia coli						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Klebsiella aerogenes						
Antibiogramme Gram négatif	Autre					
Klebsiella spp						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Proteus mirabilis						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Raoultella ornithinolytica						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Raoultella planticola						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Raoultella terrigena						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Céfépime						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI-O	
Aeromonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	> 8	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	

[illegible]

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

AST-N443 (ipm05n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre								
Pseudomonas									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N441, AST-N442 (ipm04n)	Autre								
AST-N443 (ipm05n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre								
Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme Gram positif									
Aucun type de carte AST défini (ipm03n)	Autre								
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre								
Kanamycine									
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre								
Linézolide									
Enterococcus									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667, AST-P668 (lnz02n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (lnz02s)	Autre								
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667, AST-P668 (lnz02n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (lnz02s)	Autre								
Streptococcus agalactiae									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667, AST-P668 (lnz02n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (lnz02s)	Autre								

[illegible]

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

[illegible]

Page 26 sur 38

Rapport AES sur les concentrations critiques

Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite	<= 2		> 2	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (mem03n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem03n)	Méningite	<= 0,25		> 0,25	CA-	CSN 2022-158-0
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Nitrofurantoïne						
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N436, AST-N442 (ft01n)	Autre	<= 32	64	> 64	CLSI	Cc basse non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (ft04n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (ft04n)	Urine	<= 64		> 64	CA-	
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64		> 64	CA-	MAR 3917
Escherichia coli						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N436, AST-N442 (ft01n)	Autre	<= 64		> 64	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ft04n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (ft04n)	Urine	<= 64		> 64	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64		> 64	CA-	CSN 2023-259-0
Staphylococcus saprophyticus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64		> 64	EUCAST	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64		> 64	EUCAST	
Néomycine						

[illegible]

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Version de la base de connaissances: 09.04 - 22 avr. 2025 22:49:54

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Pseudomonas										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									
Tigecycline										
Citrobacter koseri										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									CSN 5181
Enterococcus faecalis										
Antibiogramme Gram positif	Autre									CSN 4911
Enterococcus faecium										
Antibiogramme Gram positif	Autre									CSN 4911
Escherichia coli										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									CSN 5181
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre									
Streptococcus agalactiae										
Antibiogramme Gram positif	Autre									
Streptococcus beta-hemolytic group										
Antibiogramme des streptocoques	Autre									
Tobramycine										
Acinetobacter										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									
Enterobacterales										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									
Pseudomonas										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre									CSN 2023-386-0
Triméthoprim										
Enterobacterales										

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	CA-	CSN 5024-2	
Staphylococcus							
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4		> 4	CA-	CSN 5024-2	
Triméthoprime/sulfaméthoxazole							
Acinetobacter							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST		
Aeromonas							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N436, AST-N441, AST-N442 (sxt02n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST		
Burkholderia cepacia							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40		> 40	CLSI-O		
Enterobacterales							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST		
Enterococcus							
Antibiogramme Gram positif							
AST-P667 (sxt02n)	Autre	<= 20		> 20	CA-	ECOFF	
Staphylococcus							
Antibiogramme Gram positif							
AST-P667 (sxt02n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST		
AST-P668 (sxt04n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST		
Stenotrophomonas maltophilia							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N436, AST-N441, AST-N442 (sxt02n)	Autre		<= 80	> 80	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (sxt01n)	Autre						
Streptococcus agalactiae							
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST	Validé version 9.03	
Streptococcus beta-hemolytic group							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST		

Streptococcus pneumoniae					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 20		40	> 40
Antibiogramme Gram positif					EUCAST
Aucun type de carte AST défini (sx01n)	Autre	<= 20		40	> 40
Tylosine					EUCAST
Staphylococcus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-
Téicoplanine					CASFM Vétérinaire
Enterococcus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2			> 2
Staphylococcus					EUCAST
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4			> 4
Staphylococcus aureus					EUCAST
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2			> 2
Staphylococcus intermedius					EUCAST
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2			CA-
Staphylococcus pseudintermedius					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2			> 2
Streptococcus					EUCAST
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2			> 2
Streptococcus agalactiae					EUCAST
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2			> 2
Télavancine					EUCAST
Staphylococcus aureus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,125			> 0,125
Aucun type de carte AST défini (tlv04n)	Autre				EUCAST
Témocilline					
Enterobacterales					

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Escherichia coli						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-XN28 (tem01n)	Autre		<= 16	> 16	Fabricant	
AST-XN28 (tem01n)	Urine	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Klebsiella						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-XN28 (tem01n)	Autre		<= 16	> 16	Fabricant	
AST-XN28 (tem01n)	Urine	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Klebsiella aerogenes						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Proteus mirabilis						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-XN28 (tem01n)	Autre		<= 16	> 16	Fabricant	
AST-XN28 (tem01n)	Urine	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Tétracycline						
Enterobacterales						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4	8	> 8	CLSI	CASFM Vétérinaire
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P668 (te03n)	Autre	<= 1		> 1	CA-	CSN 2023-544-0
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P668 (te03n)	Autre	<= 1		> 1	CA-	CSN 2023-544-0
Aucun type de carte AST défini (te01n)	Autre					
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1		> 1	CA-	CSN 2023-544-0
Streptococcus pneumoniae						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 23 avr. 2025 21:54 CEST

Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1			> 1	CA-	CSN 2023-544-0	
Antibiogramme Gram positif								
Aucun type de carte AST défini (te01n)	Autre	<= 1		2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae								
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1			> 1	CA-	CSN 2024-814-0	
Vancomycine								
Enterococcus								
Antibiogramme Gram positif								
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 4			> 4	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 4			> 4	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 4			> 4	EUCAST		
Staphylococcus								
Antibiogramme Gram positif								
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Streptococcus								
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Streptococcus agalactiae								
Antibiogramme Gram positif								
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Voriconazole								
Candida								
Antifongigramme								
AST-YS08 (vrc01n)	Autre	<= 1		2	> 2	FDA		
Candida albicans								

