


PROCEDURE ENREGISTREMENT DES CARTES AST

1. ENREGISTREMENT DES NOUVELLES CARTES AST DANS VITEK 2 WEB


- Se connecter à l'application « VITEK 2 Web », et cliquer sur le menu « Outils » :



- Cliquer sur « Saisie des nouveaux types de cartes AST » :

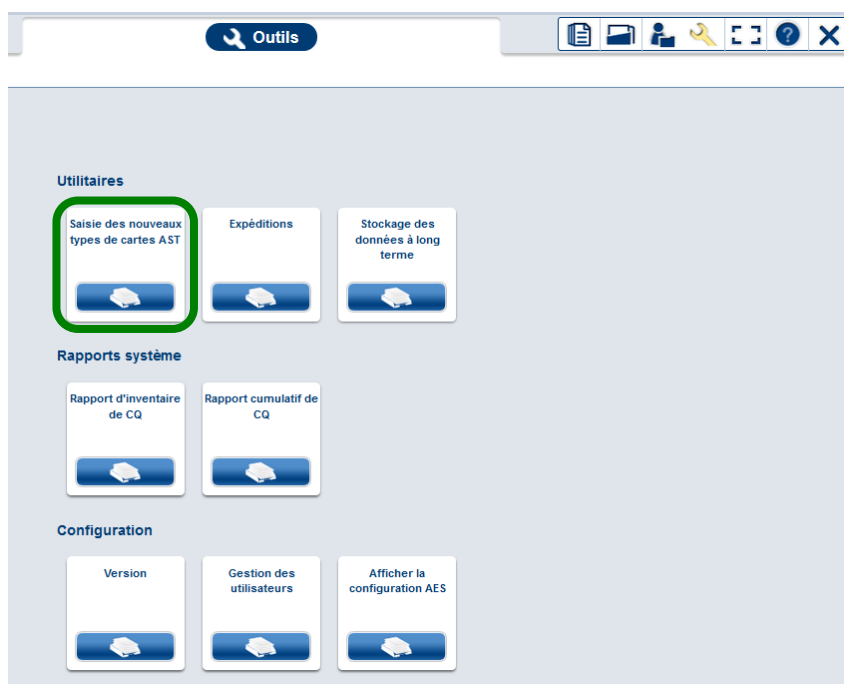

- Cliquer sur l'icône « Créez le type de carte AST » :

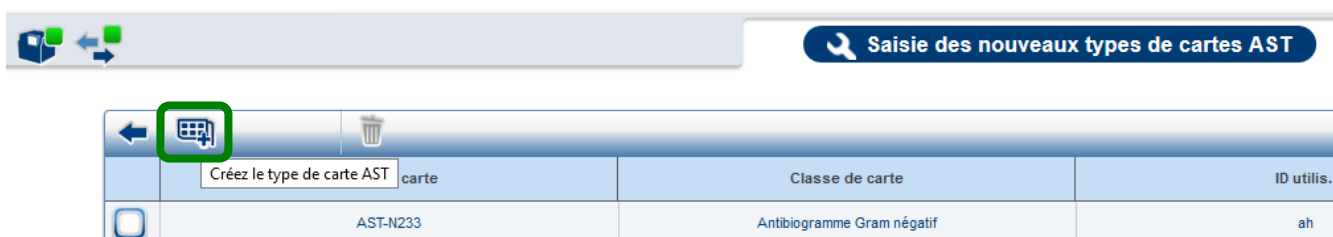



VITEK® 2 Systems PROCEDURE ENREGISTREMENT DES CARTES AST

- Dans l'emplacement « **Code à barres Notice** », scanner les codes à barres de la fiche technique de la carte dans l'ordre ou scanner le code à barres 2D de la fiche technique de la carte (disponible dans Resource Center)

Code à barres Notice

Codes à barres saisis:

Antibiotique	Code	Version d'antibiotique	Numéro de puits	Plage
--------------	------	------------------------	-----------------	-------

Liste d'antibios correspond à la notice technique.

- Une fois les codes à barres saisis, vérifier la cohérence avec la composition de la fiche technique de la carte et cocher la case « **Liste d'antibios correspond à la notice technique** »

Code à barres Notice

AST-N441: Antibiogramme Gram négatif

Codes à barres saisis:

1	A310T10I-SB
2	BAST-N441010
3	C--Z372Z026
4	D2U2V0K2W330
5	E2Y352O1W2P3
6	F0N36230000B


Antibiotique	Code	Version d'antibiotique	Numéro de puits	Plage
Amikacine	AN	an03n	3, 4, 5, 6	1.0 - 64.0; 2.0 - 64.0
Amoxicilline/acide clavulanique	AMC	amc03n	7, 8, 9	4.0 - 64.0
Ampicilline	AM	am01n	10, 11, 12	2.0 - 32.0
Céfépime	FEP	fep03n	13, 14, 15, 16, 17	0.125 - 32.0
Céfotaxime	CTX	cbt02n	18, 19, 20, 21, 22	0.25 - 64.0
Céfoxitine	FOX	fox01n	23, 24, 25	4.0 - 64.0
Ceftazidime	CAZ	caz02n	26, 27, 28, 29, 30	0.125 - 64.0
Ciprofloxacine	CIP	cip02n	31, 32, 33, 34	0.0625 - 4.0
Ertapénème	ETP	etp02n	35, 36, 37, 38	0.125 - 8.0
Gentamicine	GM	gm02n	39, 40, 41	1.0 - 16.0
Imipénème	IPM	ipm04n	42, 43, 44, 45	0.25 - 16.0
Lévofloxacine	LEV	lev02n	46, 47, 48, 49	0.125 - 8.0
Pipéracilline/azobactam	TZP	tzp03n	50, 51, 52, 53, 54, 55	4.0 - 128.0
Ticarcliline	TIC	tic01n	56, 57, 58	8.0 - 128.0
Tobramycine	TM	tm02n	59, 60, 61	1.0 - 16.0
Triméthoprime/sulfaméthoxazole	SXT	sxt02n	62, 63, 64	20.0 - 320.0

Liste d'antibios correspond à la notice technique.



VITEK® 2 Systems PROCEDURE ENREGISTREMENT DES CARTES AST

- Valider le message de confirmation en cliquant sur « OK »

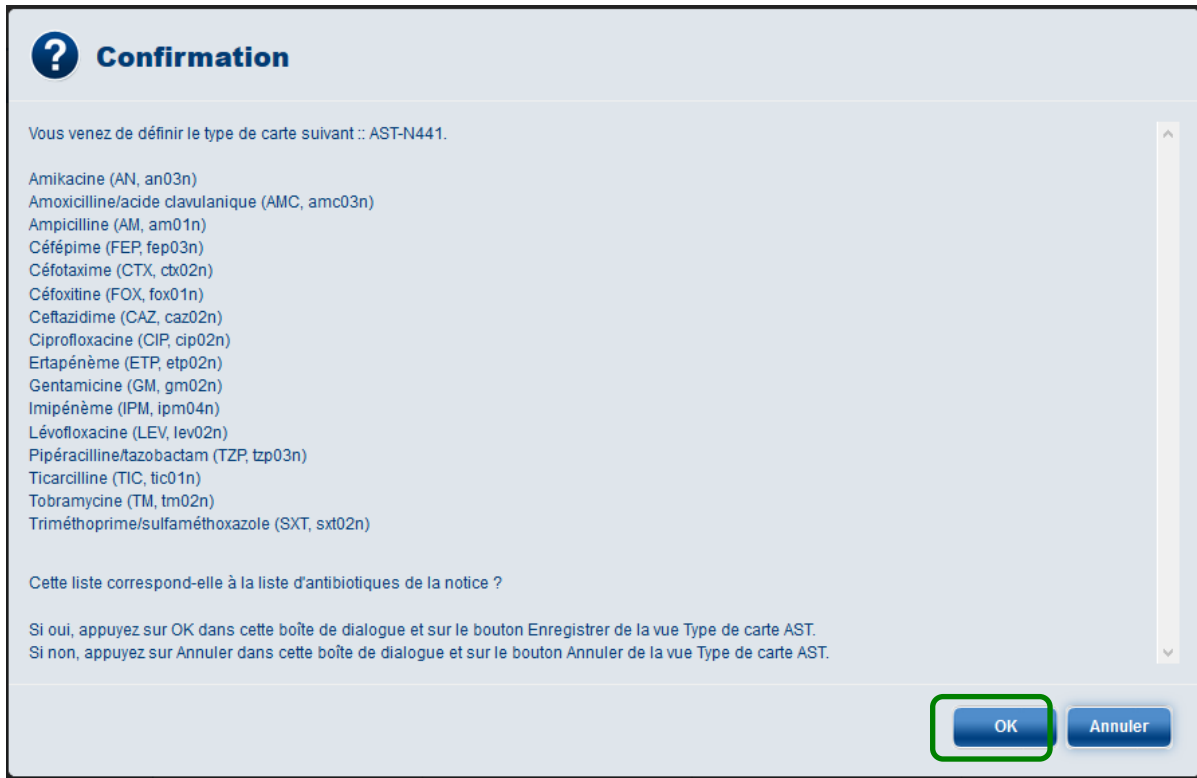

- Finaliser l'enregistrement en cliquant sur « Enregistrer la définition de la carte AST » :



Créez le type de carte AST

Enregistrer la définition de la carte AST

Code à barres Notice

Codes à barres saisis:

Code à barres	Notice
1	A310T10I-SB
2	BAST-N441010
3	C--Z372Z026
4	D2U2V0K2W330
5	EZY352O1W2P3
6	F0N36230000B

AST-N441: Antibiogramme Gram négatif

Antibiotique	Code	Version d'antibiotique	Numéro de puits	Plage
Amikacine	AN	an03n	3, 4, 5, 6	1.0 - 64.0; 2.0 - 64.0
Amoxicilline/acide clavulanique	AMC	amc03n	7, 8, 9	4.0 - 64.0
Ampicilline	AM	am01n	10, 11, 12	2.0 - 32.0
Céfépime	FEP	fep03n	13, 14, 15, 16, 17	0.125 - 32.0
Céfotaxime	CTX	cbx02n	18, 19, 20, 21, 22	0.25 - 64.0
Céfoxitine	FOX	fox01n	23, 24, 25	4.0 - 64.0
Ceftazidime	CAZ	caz02n	26, 27, 28, 29, 30	0.125 - 64.0
Ciprofloxacine	CIP	cip02n	31, 32, 33, 34	0.0625 - 4.0
Ertapénème	ETP	etp02n	35, 36, 37, 38	0.125 - 8.0
Gentamicine	GM	gm02n	39, 40, 41	1.0 - 16.0
Imipénème	IPM	ipm04n	42, 43, 44, 45	0.25 - 16.0
Lévofloxacine	LEV	lev02n	46, 47, 48, 49	0.125 - 8.0
Pipéracilline/tazobactam	TZP	tzp03n	50, 51, 52, 53, 54, 55	4.0 - 128.0
Ticarilline	TIC	tic01n	56, 57, 58	8.0 - 128.0
Tobramycine	TM	tm02n	59, 60, 61	1.0 - 16.0
Triméthoprime/sulfaméthoxazole	SXT	sxt02n	62, 63, 64	20.0 - 320.0

Liste d'antibios correspond à la notice technique.



VITEK® 2 Systems PROCEDURE ENREGISTREMENT DES CARTES AST

- Refaire la procédure pour les autres nouvelles cartes AST
- **Les nouvelles cartes sont maintenant enregistrées dans l'application VITEK 2 Web**, vous pouvez poursuivre votre activité en revenant au menu principal en cliquant sur le menu « Liste de travail » ou fermer l'application avec la croix :

ou



2. ENREGISTREMENT DES CARTES AST DANS LA SCS (pour VITEK 2 et VITEK 2 XL)

- Sur la **SCS**, appuyer sur la touche « **F6** » pour aller dans l'écran de saisie des codes pour un nouveau type de carte
- Scanner les **deux premiers codes à barres** figurant sur la notice technique de la carte AST (disponible sur Resource Center)
- Sauvegarder les données et sortir du menu

3. ENREGISTREMENT DES CARTES AST DANS LA STATION DE PREPARATION VITEK MS (pour VITEK 2 et VITEK 2 XL)

- Sur la **Station de préparation**, aller dans le menu « **Configuration** », puis « **Saisie CAB** »
- Scanner les **deux premiers codes à barres** figurant sur la notice technique de la carte AST (disponible sur Resource Center)
- Sauvegarder les données et sortir du menu