

Informations sur les jeux de paramètres :

Type : Personnalisé
Nom : CASFM EUCAST 2022 V1.0
Description : EUCAST Guideline+backfilled and Phenotypic Interpretations
Base : Global European-based+Phenotypic
État : Actif

Informations sur les instructions CMI :

Type : Personnalisé
Nom : Copie de Global European-based
Base : Global European-based

Informations de filtrage :

Tous
Version d'antibiotique : Masquer tout

Concentration(s) critique(s) :

Germe/Antibiotique/Version d'antibiotique	Catégorie	S	I	R	Origine	Commentaire
Acide fusidique						
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1		> 1	EUCAST	
Acide nalidixique						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16		> 16	CA-	
Amikacine						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (an01n)	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 5024
AST-N436 (an03n)	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 5024

Page 2 sur 36

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Enterococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre		(-)	(-)	(-)	CA-				
Streptococcus agalactiae										
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Streptococcus beta-hemolytic group										
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Streptococcus pneumoniae										
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Aztréonam										
Aeromonas										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST				
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST				
Pseudomonas										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N240, AST-XN12 (atm01n)	Autre			<= 16	> 16	CA-			CSN 5024-2	
Aucun type de carte AST défini (atm01s)	Autre									
Benzy/pénicilline										
Staphylococcus aureus										
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre		<= 0,125		> 0,125	EUCAST				
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre		<= 0,125		> 0,125	EUCAST				
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre		<= 0,125		> 0,125	EUCAST				
Staphylococcus lugdunensis										
Antibiogramme Gram positif										
AST-P667 (p02n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Autre									

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Autre					
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (p02n)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (p01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	
AST-ST03 (p01n)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Pneumonie	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (p02n)	Autre					
AST-P667 (p02n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (p06n)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5 - 2	> 2	EUCAST	
Caspofungine						
Candida						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 2			FDA	
Aucun type de carte AST défini (cas01n)	Autre	<= 2			BTC	
Candida albicans						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI-O	
Candida glabrata						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,125	0,25	> 0,25	CLSI-O	
Candida guilliermondii						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	
Candida krusei						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI-O	
Candida parapsilosis						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	
Candida tropicalis						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI-O	
Cefquinome						
Enterobacteriaceae						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire	
Pasteurella							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire	
Ceftazidime							
Acinetobacter							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (caz01n)	Autre	<= 8	16	> 16	BTC		
AST-N436 (caz02n)	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI		
Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI		
Aeromonas							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (caz01n)	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST		
AST-N436 (caz02n)	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (caz03n)	Autre						
Burkholderia cepacia							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (caz01n)	Autre	<= 8	16	> 16	BTC		
Enterobacteriaceae							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST		
Pseudomonas							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (caz01n)	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 5024-2	
AST-N436 (caz02n)	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 5024-2	
Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre						
Aucun type de carte AST défini (caz03n)	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 5024-2	
Aucun type de carte AST défini (caz03s)	Autre						
Ceftazidime/Avibactam							

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (cro01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
AST-ST03 (cro01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (cro01s)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cro01s)	Méningite					
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (cro01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cro01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Chloramphénicol						
Burkholderia cepacia						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI-O	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (c03n)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Streptococcus						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 8		> 8	CA-	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (c03n)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 8	> 8	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 8	> 8	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif					
Aucun type de carte AST défini (c01n)	Autre	<= 8	> 8	EUCAST	
Ciprofloxacine					
Acinetobacter					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (cip01n)	Autre	<= 1	> 1	CA-	CSN 5024-2
AST-N436 (cip02n)	Autre	<= 1	> 1	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre				
Aeromonas					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	> 0,5	EUCAST	
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	> 0,5	EUCAST	
Pasteurella multocida					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (cip01n)	Autre				
AST-N436 (cip02n)	Autre	<= 0,0625	> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre	<= 0,0625	> 0,0625	EUCAST	
Pseudomonas					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (cip01n)	Autre	<= 0,5	> 0,5	CA-	CSN 5024-2
AST-N436 (cip02n)	Autre	<= 0,5	> 0,5	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre				
Salmonella					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N436 (cip02n)	Autre	<= 0,0625	> 0,0625	EUCAST	

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (cip01n)	Autre		<= 1	> 1	CA-	CSN 5024-2
Clarithromycine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (clr01d)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (clr01d)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (clr01d)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Clindamycine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (cm04n)	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Aucun type de carte AST défini (cm01n)	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (cm01n)	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Colistine					
Acinetobacter					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Pseudomonas					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N240 (cs01n)	Autre	<= 2	> 2	Utilisateur	Performances validées dans versions antérieures
Pseudomonas aeruginosa					
Antibiogramme Gram négatif					
Aucun type de carte AST défini (cs02n)	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Céfadroxil					
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	> 16	EUCAST	
Céfalexine					
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	> 16	EUCAST	
Céfixime					
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	> 1	EUCAST	
Céfotaxime					

Page 13 sur 36

Version de la base de connaissances: 09.03 - 20 avr. 2023 10:35:22

Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 1	2	> 2			EUCAST	
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 1	2	> 2			EUCAST	
Daptomycine									
Enterococcus faecalis									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 4		> 4			CA-	
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 1		> 1			EUCAST	
Streptococcus agalactiae									
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 1		> 1			EUCAST	
Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667, AST-P668 (dap02n)	Autre		IE	IE	IE			CA-	
Delafloxacin									
Escherichia coli									
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 0,125		> 0,125			CA-	CSN 2022-009-0
Doxycycline									
Enterococcus									
Antibiogramme Gram positif									
Aucun type de carte AST défini (do01n)	Autre		(-)	(-)	(-)			CA-	
Pasteurella multocida									
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 1		> 1			EUCAST	
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif									
Aucun type de carte AST défini (do01n)	Autre		<= 1	2	> 2			EUCAST	
Streptococcus agalactiae									
Antibiogramme Gram positif									
Aucun type de carte AST défini (do01n)	Autre		<= 1	2	> 2			EUCAST	

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Streptococcus beta-hemolytic group	Autre								
Antibiogramme des streptocoques									
Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre								
Antibiogramme Gram positif									
Aucun type de carte AST défini (do01d)	Autre								
Enrofloxacin									
Gram negative bacilli									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre								
Streptococcus agalactiae									
Antibiogramme Gram positif	Autre								
Eravacycline									
Escherichia coli									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Ertapénème									
Acinetobacter									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Enterobacteriaceae									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Pseudomonas									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme Gram positif									
Aucun type de carte AST défini (etp02n)	Autre								
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre								

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antifongogramme	Autre	<= 4	8 - 16	> 16	FDA	
Cryptococcus neoformans						
Antifongogramme	Autre					
Fluméquine						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	CASFM Vétérinaire
Pasteurella						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	CASFM Vétérinaire
Fosfomycine						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 32		> 32	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 32		> 32	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme Gram positif	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Gentamicine						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (gm01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-009-0
Aucun type de carte AST défini (gm02n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-009-0
Aucun type de carte AST défini (gm02s)	Autre					
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (gm01n)	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Aucun type de carte AST défini (gm02n)	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Aucun type de carte AST défini (gm02s)	Autre					

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (ipm04n)	Autre								CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre								CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm05n)	Autre								CA-	CSN 4911
Proteus										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (ipm04n)	Autre								CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre								CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm05n)	Autre								CA-	CSN 4911
Providencia										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (ipm04n)	Autre								CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre								CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm05n)	Autre								CA-	CSN 4911
Pseudomonas										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (ipm04n)	Autre								CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (ipm05n)	Autre								CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre									
Streptococcus pneumoniae										
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (ipm03n)	Autre								EUCAST	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae										
Antibiogramme des streptocoques	Autre								EUCAST	
Kanamycine										
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre								CA-	

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

AST-N240, AST-N436, AST-XN12 (lev02n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	CA-	MAR 4293
Aeromonas						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-N436, AST-XN12 (lev02n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre					
Burkholderia cepacia						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-N436, AST-XN12 (lev02n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	CA-	MAR 4293
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (lev01n)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev02n)	Autre	<= 4		> 4	CA-	MAR 4293
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 1	> 1	CA-	CSN 5024-2
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (lev01n)	Autre		<= 1	> 1	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (lev02n)	Autre					
Stenotrophomonas maltophilia						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (lev01n)	Autre		<= 2	> 2	CA-	CSN 5024-2
Streptococcus beta-hemolytic group						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme des streptocoques	Autre			<= 2	> 2	CA-	CSN 5024-2	
Streptococcus pneumoniae								
Antibiogramme des streptocoques	Autre			<= 2	> 2	CA-	CSN 5024-2	
Antibiogramme Gram positif								
Aucun type de carte AST défini (lev02n)	Autre			<= 2	> 2	CA-	CSN 5024-2	
Marbofloxacin								
Gram negative bacilli								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1		2	> 2	CA-	CASFM Vétérinaire	
Staphylococcus								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1		2	> 2	CA-	Vétérinaire	
Streptococcus agalactiae								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1		2	> 2	CA-	CASFM Vétérinaire	
Meropenem/Vaborbactam								
Acinetobacter								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)		(-)	(-)	CA-		
Enterobacteriaceae								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8			> 8	EUCAST		
Pseudomonas aeruginosa								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8			> 8	EUCAST		
Micafungine								
Candida								
Antifongogramme								
Aucun type de carte AST défini (mcf01n)	Autre	<= 2				BTL		
Candida albicans								
Antifongogramme								
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25		0,5	> 0,5	CLSI		
Candida glabrata								
Antifongogramme								

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,0625	0,125	> 0,125	CLSI	
Candida guilliermondii						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI	
Candida krusei						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI	
Candida parapsilosis						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI	
Candida tropicalis						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI	
Minocycline						
Burkholderia cepacia						
Antibiogramme Gram négatif						
Aucun type de carte AST défini (mno01n)	Autre	<= 4	8	> 8	CLSI	
Aucun type de carte AST défini (mno02n)	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (mno01n)	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5024-2
Stenotrophomonas maltophilia						
Antibiogramme Gram négatif						
Aucun type de carte AST défini (mno02n)	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5024-2

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Moxifloxacine										
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 0,25				> 0,25		EUCAST	
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (mxf01n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (mxf02n)	Autre		<= 0,25				> 0,25	CA-	MAR 4293	
Staphylococcus aureus										
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (mxf02s)	Autre		<= 0,25				> 0,25		EUCAST	
Streptococcus agalactiae										
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (mxf02n)	Autre		<= 0,5				> 0,5		EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mxf02s)	Autre		<= 0,5				> 0,5		EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group										
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5				> 0,5		EUCAST	
Streptococcus pneumoniae										
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5				> 0,5		EUCAST	
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (mxf01n)	Autre		<= 0,5				> 0,5		EUCAST	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae										
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5				> 0,5	CA-		
Méclillinam										
Escherichia coli										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8				> 8		EUCAST	
Méropénème										
Acinetobacter										
Antibiogramme Gram négatif										

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Méningite	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite					
Burkholderia cepacia						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	Validé dans Gram negative bacilli
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	Validé dans Gram negative bacilli
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Méningite	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite					
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Pseudomonas aeruginosa						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-	
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Méningite	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-	
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-	
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite					

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Streptococcus pneumoniae										
Antibiogramme des streptocoques										
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2						> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite									
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (mem03n)	Autre	<= 2						> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem03n)	Méningite	<= 0,25						> 0,25	CA-	CSN 2022-158-0
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae										
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2						> 2	EUCAST	
Nitrofurantoin										
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 32	64					> 64	CLSI	Cc basse non conforme au CASFM
Enterococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64						> 64	CA-	MAR 3917
Escherichia coli										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 64						> 64	EUCAST	
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64						> 64	CA-	CSN 2023-259-0
Staphylococcus saprophyticus										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64						> 64	EUCAST	
Streptococcus agalactiae										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64						> 64	EUCAST	
Néomycine										
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16					> 16	CA-	CASFM Vétérinaire
Pasteurella										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16					> 16	CA-	CASFM Vétérinaire
Staphylococcus										

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 8	16	> 16	CA-	CASFM Vétérinaire
Ofloxacine						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Oxacilline						
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Staphylococcus aureus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Staphylococcus lugdunensis						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Staphylococcus saprophyticus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Pipéracilline						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2
Pipéracilline/tazobactam						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre		<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre					
Pradofloxacin						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Pasteurella						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Quinupristine/dalfopristine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (qda01n)	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (qda01n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Rifampicine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	CLSI	Cc haute non conforme au CASFM
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (ra03n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (ra01n)	Autre								
Streptococcus agalactiae									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667, AST-P668 (ra03n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 0,5	> 0,5	EUCAST				Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (ra01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 0,5	> 0,5	EUCAST				
Streptococcus beta-hemolytic group									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,0625	0,125 - 0,5	> 0,5	EUCAST				Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,125	0,25 - 0,5	> 0,5	CA-				CSN 5024 - Cc haute non conforme au CASFM
Roxithromycine									
Enterococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-				
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST				
Streptococcus agalactiae									
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST				
Streptococcus beta-hemolytic group									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST				
Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST				
Ticarcilline									
Acinetobacter									
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-				
Enterobacteriaceae									
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST				
Pseudomonas									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Ticarcilline/acide clavulanique									

	Acinetobacter									
	Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-				
	Burkholderia cepacia									
	Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CLSI-O				
	Enterobacteriaceae									
	Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST				
	Pseudomonas									
	Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	> 16	CA-		CSN 5024-2		
	Tigecycline									
	Citrobacter koseri									
	Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-		CSN 5181		
	Enterococcus faecalis									
	Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25		> 0,25	CA-		CSN 4911		
	Enterococcus faecium									
	Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25		> 0,25	CA-		CSN 4911		
	Escherichia coli									
	Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-		CSN 5181		
	Staphylococcus									
	Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST				
	Streptococcus agalactiae									
	Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,125		> 0,125	CA-		CSN 4911		
	Streptococcus beta-hemolytic group									
	Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,125		> 0,125	CA-		CSN 4757		
	Streptococcus pneumoniae									
	Antibiogramme des streptocoques	Autre	IE	IE	IE	CA-				
	Streptococcus viridans group except S.pneumoniae									
	Antibiogramme des streptocoques	Autre	IE	IE	IE	CA-				
	Tobramycine									

Acinetobacter										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	EUCAST					
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N240 (tm01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-				CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (tm02n)	Autre	<= 2		> 2	CA-				CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (tm02s)	Autre									
Pseudomonas										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N240 (tm01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-				CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (tm02n)	Autre	<= 2		> 2	CA-				CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (tm02s)	Autre									
Triméthoprime										
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	CA-				CSN 5024-2	
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4		> 4	CA-				CSN 5024-2	
Triméthoprime/sulfaméthoxazole										
Acinetobacter										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST					
Aeromonas										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N234, AST-N240 ... (sxt02n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST					
Aucun type de carte AST défini (sxt01n)	Autre									
Burkholderia cepacia										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40		> 40	CLSI-O					
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST					

Page 33 sur 36

Version de la base de connaissances: 09.03 - 20 avr. 2023 10:35:22

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre								
Voriconazole									
Candida									
Antifongogramme	Autre	<= 1	2	> 2	FDA				
Érythromycine									
Enterococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5	1 - 4	> 4	CA-	CSN 2023-259-0			
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667, AST-P668 (e05n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST				
Aucun type de carte AST défini (e02n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST				
Aucun type de carte AST défini (e02s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST				
Aucun type de carte AST défini (e05s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST				
Streptococcus agalactiae									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667, AST-P668 (e05n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Aucun type de carte AST défini (e02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Aucun type de carte AST défini (e02s)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Aucun type de carte AST défini (e05s)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Streptococcus beta-hemolytic group									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Antibiogramme Gram positif									
Aucun type de carte AST défini (e04n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST				
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CA-				